


## Поручни для унитаза: как выбрать и как установить.

### 1. Что учесть при выборе поручня для унитаза:


- Длина унитаза**  
Поручни должны выступать вперед от переднего края унитаза не менее чем на 150 мм., поэтому выбирать длину поручня нужно исходя из длины унитаза.
- Расположение поручня относительно унитаза**  
Поручень со стороны бокового подъезда коляски обязательно должен быть откидным, чтобы не мешать пересадке. Поручень с другой стороны унитаза должен быть стационарным, жестко зафиксированным.
- Расположение унитаза относительно стен санузла (угловое или центральное)**  
Если унитаз расположен в углу (расстояние от оси унитаза до стены:  $\leq 35$  см.), то стационарный поручень размещается вдоль унитаза на боковой стене. Это должен быть комбинированный настенный поручень, имеющий горизонтальный и вертикальный участки, например, L-образный (рис.1). Длина вертикального участка - не менее 600 мм.  
Если расположение унитаза центральное (расстояние от оси унитаза до стены:  $> 35$  см.), в качестве стационарного поручня целесообразно выбрать поручни настенно-напольного крепления, например h-образный поручень (рис.2).
- Несущая способность стен**  
Если стены санузла прочные, можно выбирать поручни настенного крепления (рис.1). Для ситуаций, когда несущая способность стен недостаточна, предусмотрены поручни на стойках настенно-напольного и напольного крепления (рис.2).

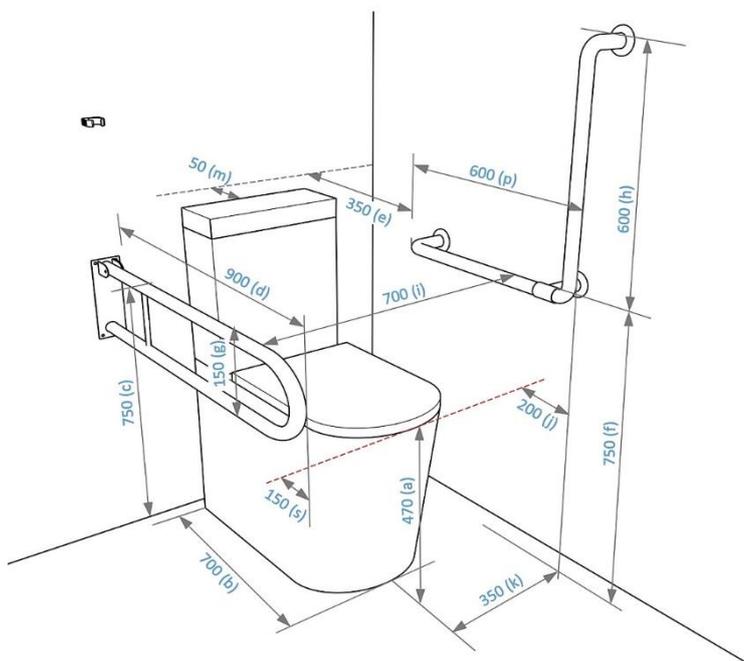

**Рисунок 1.**

**Угловое расположение унитаза, прочные стены:**

- Стационарный поручень: настенный L-образный;
- Откидной поручень: настенный.

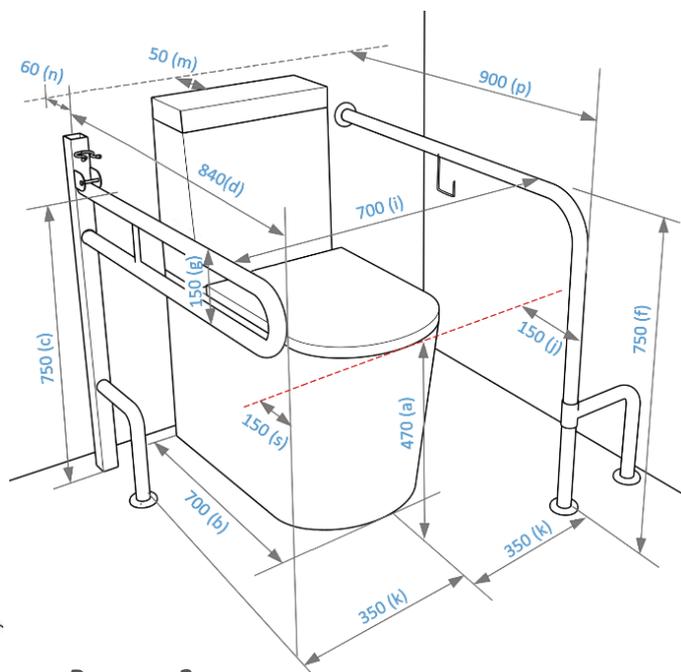

**Рисунок 2.**


**Центральное расположение унитаза, хрупкие стены:**

- Стационарный поручень: h-образный;
- Откидной поручень: на стойке.

## 2. Как установить поручни к унитазу:

- **Расстояние между поручнями**  
Поручни должны быть установлены с обеих сторон унитаза на одинаковом расстоянии от его оси (центра). Расстояние между поручнями должно составлять 700-750 мм.
- **Высота установки поручней**  
Горизонтальная часть поручня должна располагаться на 300 мм. выше уровня сиденья унитаза. При правильной высоте унитаза в 450 мм. горизонтальные части поручней для унитаза устанавливаются на высоте 750 мм.
- **Конструктивные элементы поручней**  
Элементы поручней, которые размещаются со стороны бокового доступа к унитазу (с той стороны, где будет размещаться кресло-коляска при пересадке на унитаз), не должны выступать в зону размещения коляски более, чем на 150 мм.
- **Особенности установки L-образного настенного поручня**  
При угловом расположении унитаза в качестве стационарного поручня рекомендован настенный L-образный поручень (рис.1). Его горизонтальный участок должен отступать от начала бачка или инсталляции не более чем на 300 мм. и выходить за передний край унитаза на расстояние не менее 150 мм.

**СДЕЛАЕМ  
ПРОЕКТ**  
ВАШЕГО САМУЗЛА  
БЕСПЛАТНО

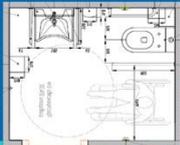

СОГЛАСНО  
ГОСТ И СП

**ЗАКАЗАТЬ**

**САНТЕХНИКА  
ПОРУЧНИ  
АКСЕССУАРЫ**



В САМУЗЕЛ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
В НАЛИЧИИ!

**ЗАКАЗАТЬ**

**ПАМЯТКА**  
**САМУЗЕЛ**  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



ЧТО И КАК  
УСТАНОВИТЬ  
СОГЛАСНО ГОСТ И СП

**СКАЧАТЬ**

### Также вас может заинтересовать:

1. [Готовые комплекты поручней с унитазами](#)
2. [Скачать каталоги и прайсы](#)
3. [Оборудование для инклюзивного образования](#)
4. Мы сняли для вас много обучающих обзорных видео по товарам и нормативам. Все можно найти на нашем сайте и [YouTube](#) канале.
5. Также, можете ознакомиться с [примерами реализованных проектов](#).

## О компании «Доступная страна»

«Доступная страна» – одна из ведущих российских компаний в области создания доступной среды, организации реабилитации и оснащения учреждений инклюзивного образования.

Мы производим и поставляем оборудование для людей с инвалидностью и создаем для них комфортные и правильные с точки зрения норм общественные и жилые пространства.

### Направления деятельности:

- Производство и поставка в государственные и коммерческие организации оборудования для людей с инвалидностью по программе "Доступная среда", а также оборудования для инклюзивного образования и детей с ОВЗ;
- Производство и продажа реабилитационного оборудования, в т.ч. комплектация Пунктов проката ТСР и Школ ухода проекта «Старшее поколение»;
- Оснащение тренировочных квартир и квартир для сопровождаемого проживания;
- Готовые решения для адаптации жилых квартир, а также территорий жилых комплексов;
- Оборудование и решения для реабилитации участников СВО;
- Оборудование и готовые решения для проектов «Модельные библиотеки», «Современная школа», «Цифровая среда» и другим;
- Услуги: проектирование Доступной среды, установка и монтаж поставленной продукции, обучение персонала заказчика по завершению проекта или поставки.

Компания "Доступная страна" работает с 2013 года, за более чем 10 лет нами оборудовано уже порядка 12 000 учреждений из 89 регионов по всей РФ. В нашем ассортименте более 5 000 наименований проверенной, созданной для людей продукции, отвечающей всем необходимым требованиям нормативной документации.

Сотрудники, оказывающие консультации, прошли обучение по программе ВОИ. Мы хорошо знаем требования нормативной документации и особенности различного оборудования для людей с инвалидностью, поэтому в каждом конкретном случае можем подобрать оптимальный сценарий адаптации здания.



[Оставьте заявку на сайте](#)

или напишите нам на [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru) или в [WhatsApp](#)  
и получите экспертную консультацию и помощь в подборе оборудования

**8 800 200 13 80**