

ПАСПОРТ

Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры Medbeep Med-71, арт. Med-71



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие представляет собой компактное беспроводное передающее устройство в пластиковом влагозащищенном корпусе. В комплект поставки входит сама кнопка вызова, элемент питания (батарея типа 23A / 12V), а также браслет с креплением на липучке для фиксации устройства на руке или на вертикальной поверхности (например, на капельнице, поручне кровати, стене). Устройство готово к эксплуатации после установки батарейки.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка предназначена для использования в медицинских и социальных учреждениях (больницы, клиники, хосписы, центры социального обслуживания, санатории), а также в домашних условиях для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и пациентов, нуждающихся в экстренном вызове персонала или помощи. Влагозащищенный корпус позволяет применять устройство в помещениях с повышенной влажностью, включая санузлы, душевые и процедурные кабинеты. Является частью беспроводной системы вызова персонала, работая в паре с приемными устройствами (пультом, табло, пейджером).

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на передаче радиосигнала на частоте 433,92 МГц при нажатии пользователем кнопки. Устройство работает от автономного источника питания (батареи), что обеспечивает его мобильность и независимость от электросети.

При нажатии на кнопку:

- Загорается красный светодиодный индикатор, подтверждающий отправку сигнала.
- Радиосигнал с уникальным идентификатором данной кнопки передается на приемное устройство (пульт, табло, пейджер), которое отображает номер вызвавшей кнопки. Процесс настройки включает в себя регистрацию кнопки в памяти приемника под определенным номером, что позволяет персоналу точно идентифицировать место вызова (палату, койку, помещение). Крепление на липучке обеспечивает гибкость размещения: кнопку можно закрепить на поручне, стене, прикроватной тумбе или надеть на запястье пациента. Срок службы батарейки составляет до 12 месяцев; замена производится простым снятием основания кнопки.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры: Беспроводное передающее устройство (кнопка вызова) системы вызова персонала.

Тип системы: Беспроводная, радиоканальная.

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Радиус действия: Не менее 100 метров (в условиях прямой видимости).

Питание: Батарея 23A / 12V (входит в комплект). Срок службы батарейки – до 12 месяцев.

Индикация отправки вызова: Светодиодный индикатор красного цвета.

Корпус:

Материал: пластик.

Цвет: белый.

Степень защиты: влагозащищенный (возможно использование в помещениях с повышенной влажностью).

Способ крепления: Браслет с липучкой (для фиксации на руке или на вертикальных/горизонтальных поверхностях).

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 89 мм x 47 мм x 20 мм.

Вес нетто: 60 г.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопка не требует сложного монтажа. Для ввода в эксплуатацию необходимо:

1. Убедиться в наличии батарейки и ее работоспособности (при первом использовании может потребоваться удалить изолирующую прокладку).
2. Выбрать способ и место крепления: зафиксировать кнопку с помощью липучки на руке пациента, прикрепить к поручню, капельнице, стене или иной поверхности.
3. Выполнить процедуру регистрации кнопки в приемном устройстве (пульте, табло) в соответствии с инструкцией, присвоив ей определенный номер (например, номер палаты или койки).

В процессе эксплуатации пользователь при необходимости нажимает кнопку. Красный индикатор подтверждает, что сигнал отправлен. После получения вызова и его обработки персоналом, система может быть сброшена с приемного устройства.

Для замены элемента питания необходимо снять основание кнопки, извлечь старую батарейку и установить новую, соблюдая полярность. Рекомендуется периодически проверять работоспособность кнопки и надежность крепления.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4