

Раковина для инвалидов DSTRANA, арт. 4624


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.


1. НАСТЕННАЯ РАКОВИНА

Следования этим инструкциям по монтажу с использованием поставляемого в комплекте оборудования будет более чем достаточно для установки изделия на стене.

Поставляемое в комплекте оборудование


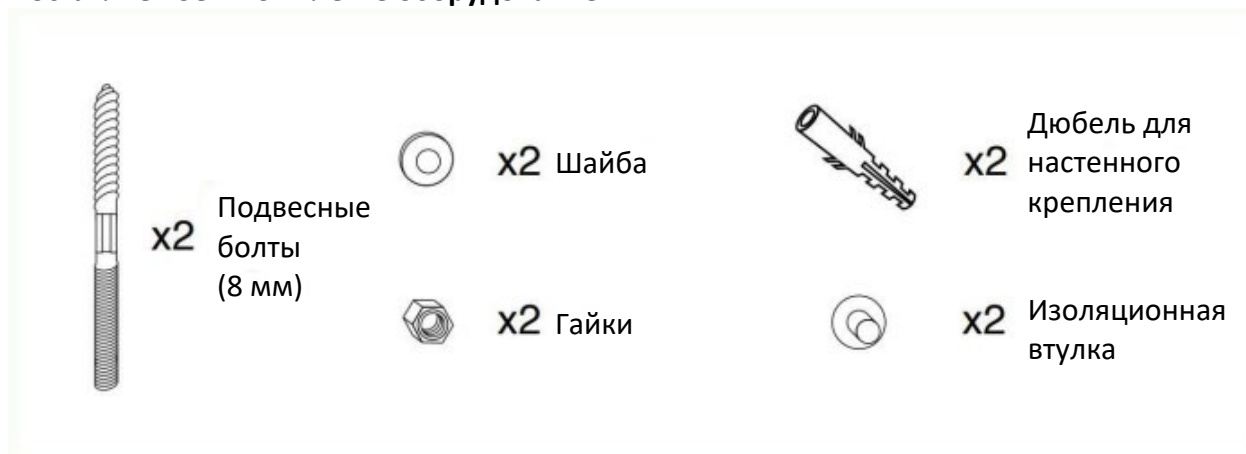


Инструменты, которые могут вам понадобиться

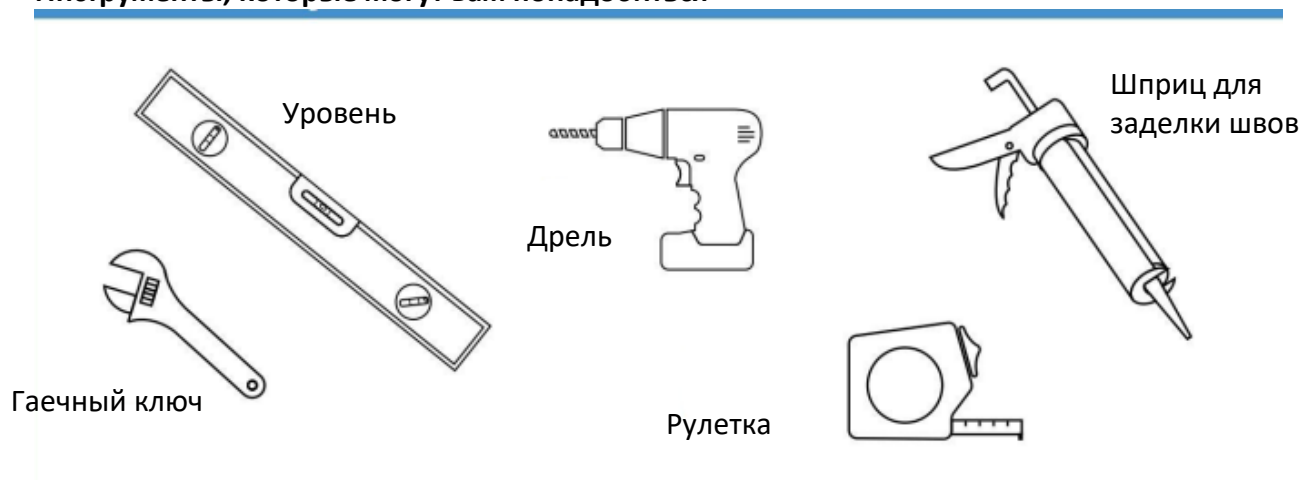

1. Подготовьте место

Разместите в стене шпильки. Если шпильки не совпадают с отверстиями в задней части раковины, не забудьте добавить достаточное количество настенных опор за готовой стеной.

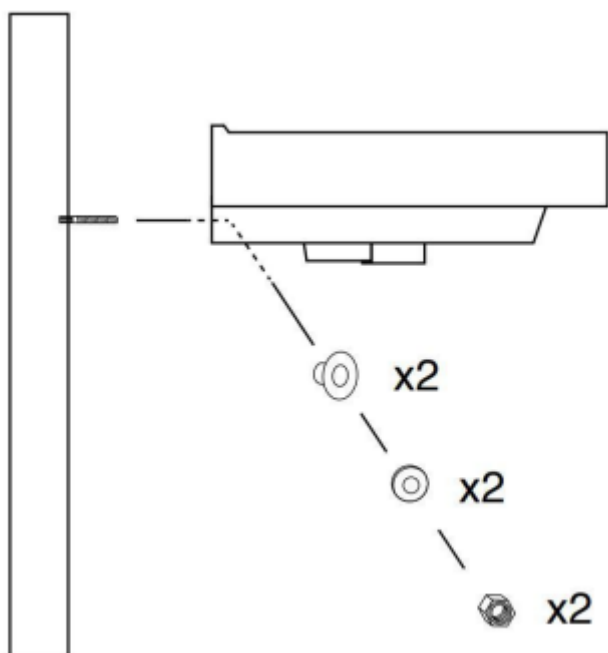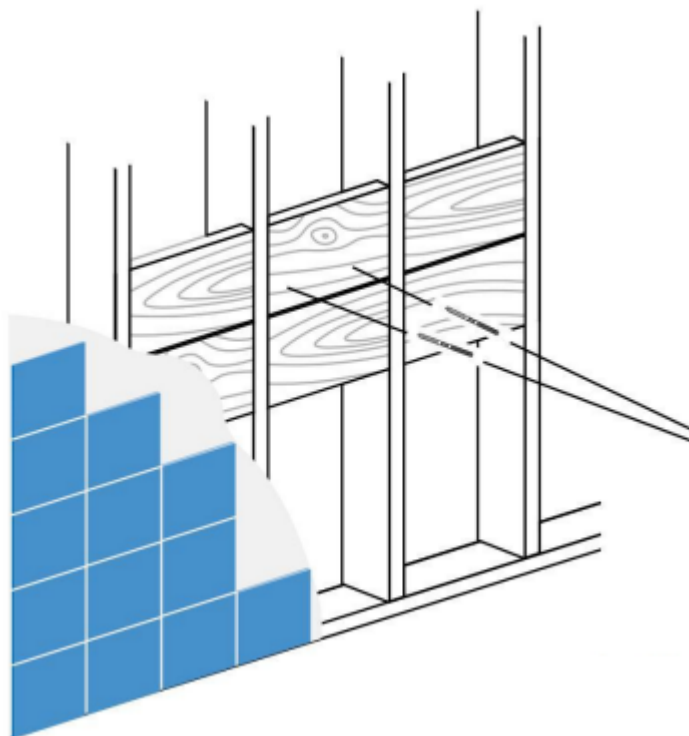


2. Установите подвесные болты

Измерьте расстояние между монтажными отверстиями в задней части раковины. Просверлите направляющие отверстия в дереве и вкрутите подвесные болты. Проверьте положение уровнем.

3. Закрепите раковину при помощи шайб и гаек

Закрепите раковину на двух подвесных болтах. Закрепите раковину при помощи изоляционных втулок, шайб и гаек. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерной затяжки болтов. Чрезмерная затяжка может привести к тому, что раковина расколется и треснет.

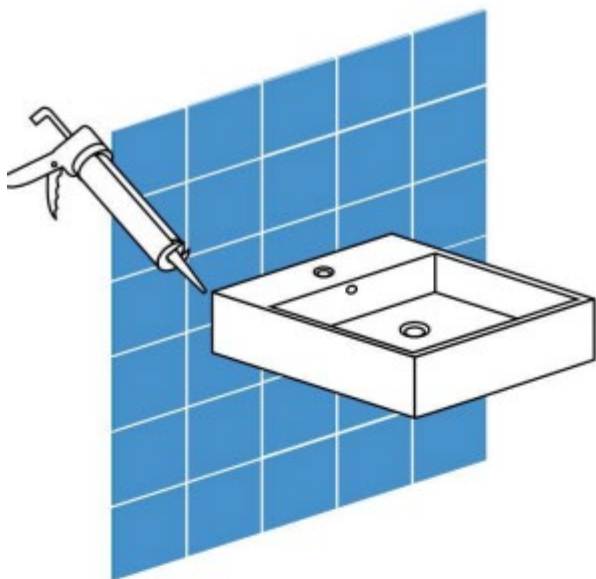

4. Нанесите герметик

Завершите установку раковины полоской герметика между раковиной и стеной.



5. Аксессуары для раковины

Завершите установку, добавив к раковине предпочитаемые сантехнические аксессуары, такие как смеситель, слив, Р-образный сифон и угловые клапаны.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

3. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4