

Эвакуационный лестничный стул (кресло) с электроприводом, арт. 2556

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.


1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Лестничное кресло соответствует стандартам CE и ISO, питается от литий-ионной батареи и приводится в движение двигателем, что позволяет легко перевозить пациентов с ограниченной подвижностью вверх и вниз.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон высоты телескопической рамы: В108см, В127 см, В146 см, В164 см
- Размеры кресла: 108*52.1*103 см
- Размер сидения: 49*42.5 см
- Высота сидения: 50 см
- Диапазон длины телескопической рукоятки: 15 см, 35 см
- Длина задних рукояток: 26 см
- Размер в сложенном виде: Д108*Ш52.1*В24.2 см
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Угол наклона резиновых гусеничных лент: 20°
- Вес НЕТТО: 34 кг
- Вес зарядного устройства: 0.4 кг
- Рабочая мощность: АС 100-240V 50/60 Гц
- Двигатель: DC 120W
- Аккумулятор: 24V / 13.2Ah
- Габариты упаковки: Д115*Ш58*В32 см/ Деревянный бокс
- Вес БРУТТО: 46 кг

3. СХЕМА

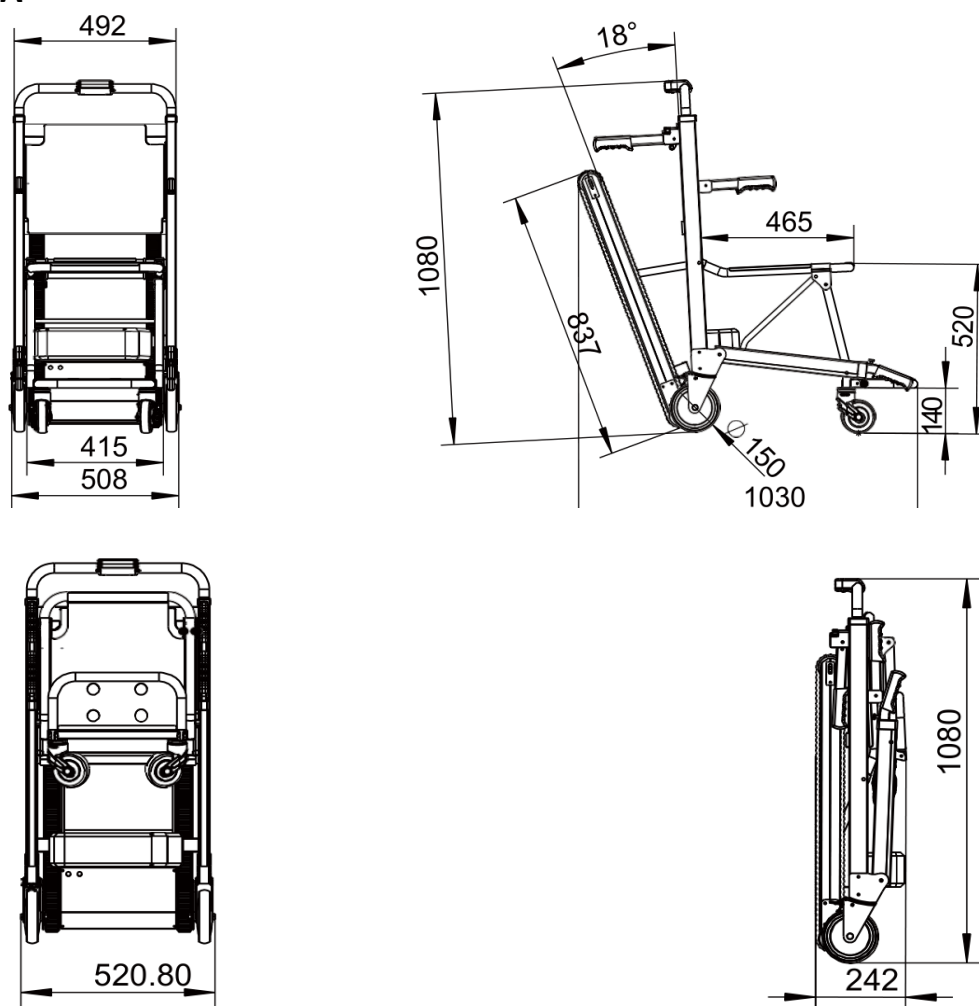

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ



1). Регулируемый съёмный подголовник	7). Кнопка для передних рукояток
2). Передние рукоятки	8). Аккумулятор
3). Ремень безопасности	9). Ключи
4). Опорная рама	10). Гусеничный ремень
5). Подставка для ног	11). Задние рукоятки
6). Телескопические передние рукоятки	12). Кнопка для задних рукояток



13). Панель управления	19). Защита двигателя
14). Красная планка для фиксации рукоятки	20). Тормоз
15). Верхняя планка для откидывания кресла	21). Задние колеса
16). Красная планка для возврата гусениц в исходное положение	22). Педаль разблокировки тормоза
17). Красная педаль разблокировки гусениц	23). Передние колеса
18). Нижняя планка для откидывания кресла	24). Регулируемая рама

5. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядное устройство должно быть протестировано перед использованием и по мере необходимости в соответствии с местными рекомендациями.

Технические характеристики аккумулятора можно найти на самом аккумуляторе.



Подключите адаптер питания постоянного тока a1 к разъему a3 для зарядки аккумулятора (подключите другой конец a2 к настенной розетке) для зарядки. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, прежде чем использовать лестничное кресло. Аккумулятор полностью заряжен, если индикатор a4 на загорается зеленым.

Зарядное устройство заряжает аккумулятор на 100%.

По завершении зарядки на полную мощность, аккумулятор переходит в режим сбережения во избежание перезаряда аккумулятора.

* Если заряд аккумулятора составляет менее 25%, требуется зарядка.

* Если аккумулятор заряжен не полностью на 100%, для достижения максимальной емкости ему потребуется несколько циклов зарядки и разрядки.

Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство.

Пожалуйста, убедитесь, что зарядное устройство не подвергается воздействию влаги во время зарядки аккумулятора.

Никогда не прикасайтесь к вилке и разъёмам влажными руками.

* По завершении зарядки выньте вилку переменного тока напряжением 240 В, затем вилку зарядного устройства. Аккумулятор следует заряжать после каждого использования.

* Аккумулятор следует проверять и заряжать перед использованием, но не реже одного раза в 2 недели.

6. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Прорезь на внутренней стороне батареи должна совпадать с направляющей рейкой, проталкивайте батарею вдоль направляющей рейки в направлении стрелки **b1** до щелчка, пока она не встанет на место. Поверните ключ по часовой стрелке **9**

Поверните аккумулятор на 180°, чтобы зафиксировать его на стуле.




Нажмите кнопку посередине, загорятся четыре красных индикатора каждый из которых означает 25% ёмкости, пожалуйста, не используйте кресло-подъёмник, при одном красном индикаторе. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.

* Литий-ионный аккумулятор является расходным материалом.

* Если на дисплее отображается низкое энергопотребление или напряжение, требуется зарядка.

7. ПОДГОТОВКА КРЕСЛА-ПОДЪЁМНИКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Раскладывание

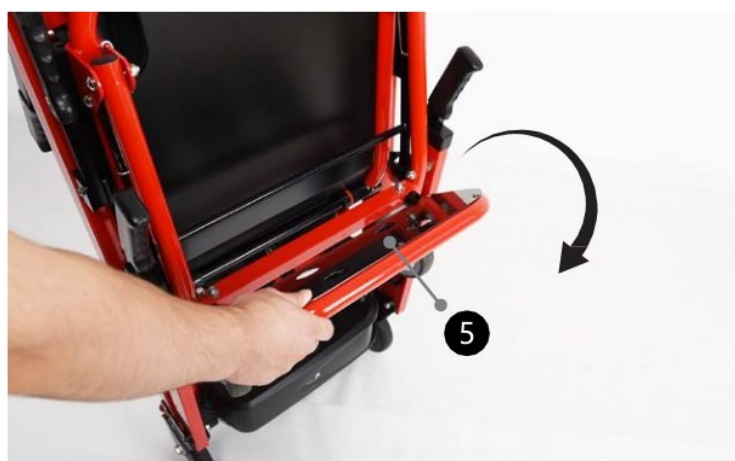

Разложите педаль, как показано рисунке



Разложите кресло, как показано на рисунке

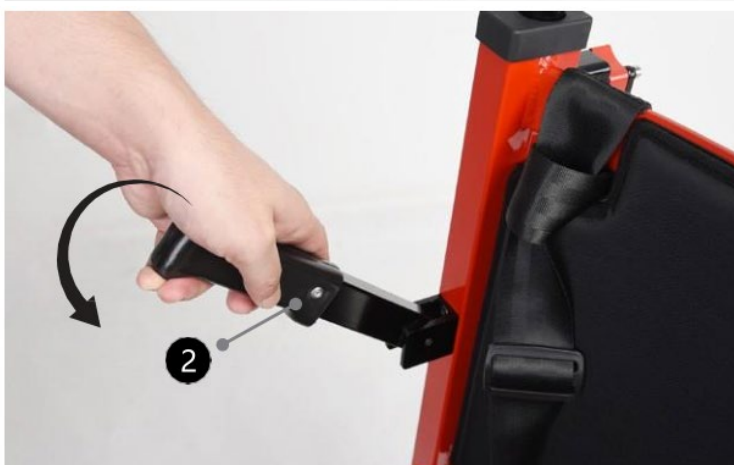


Разложите подлокотники, как показано на рисунке

Складывание рукояток



При необходимости разложите задние рукоятки, как показано на рисунке, до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении

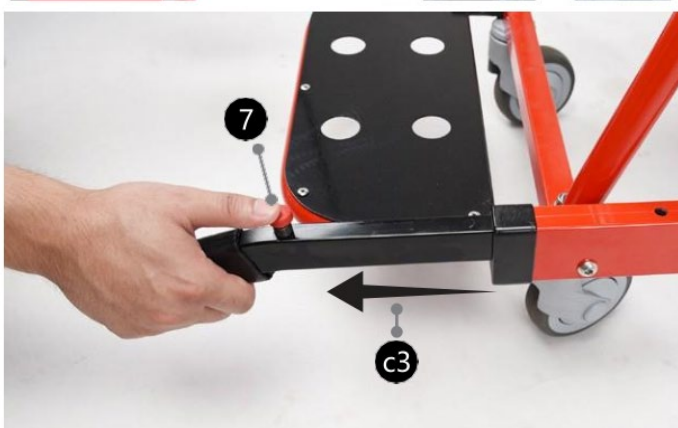

Раздвиньте телескопические передние подъемные ручки: Нажмите красную кнопку и потяните ручки в направлении, указанном стрелкой, пока они не зафиксируются в нужном положении



Для разблокировки гусениц:
Нажмите на красную педаль
блокировки


Складывание кресла



Сложите подлокотники:
Сложите подлокотники, как
показано на рисунке




Возьмитесь за сиденье
одной рукой, а другой - за
раму, нажмите на откидную
опорную планку, затем,
после того как планка
выйдет из фиксирующего
положения, сложите
сиденье.

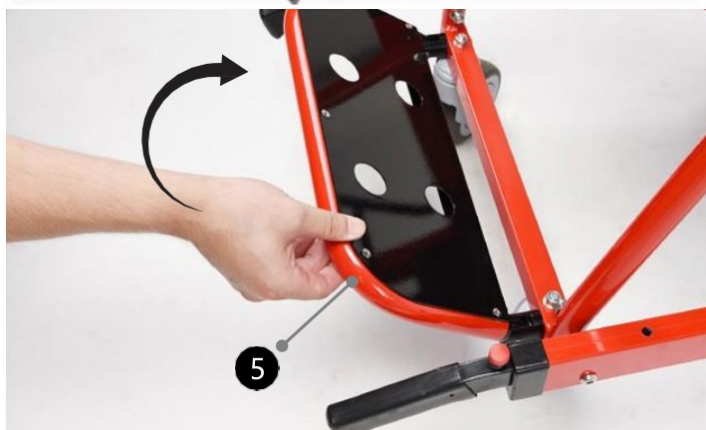


Сложите опору для ног, как
показано на рисунке



Сложите задние рукоятки:
Нажмите на фиксаторы и
опустите ручки вниз

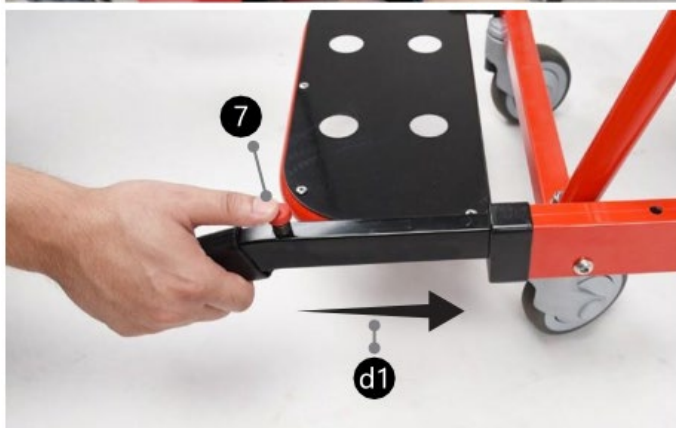

Сложите передние рукоятки:
Нажмите красную кнопку и
вставьте ручки в раму

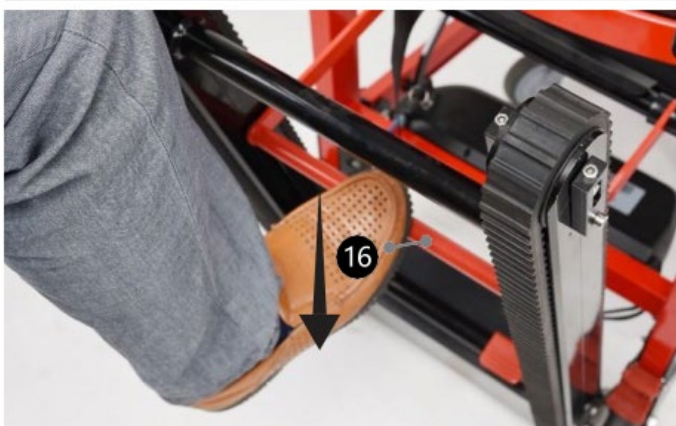

Сложите гусеничные ленты:
Нажмите на красную планку
по направлению вниз

Настройка телескопической рукоятки



Установите
телескопическую раму **d2** в
самое нижнее положение в
разобранном положении
кресла.



Поднимаясь наверх или спускаясь по лестнице, оператор должен отрегулировать высоту телескопической рамы в соответствии с высотой плеч оператора.

Чтобы поднять раму:

Нажмите на красную фиксирующую планку внутрь и потяните ручку вверх на подходящую высоту, затем отпускайте фиксирующую планку до тех пор, пока ручка не зафиксировется на подходящей высоте.

Чтобы опустить раму:

Нажмите на красную фиксирующую планку внутрь и опустите ручку вниз на подходящую высоту, затем отпускайте фиксирующую планку до тех пор, пока ручка не зафиксировется на подходящей высоте.

Подголовник и ремень безопасности




Отрегулируйте и закрепите подголовник на подходящей высоте с помощью ремня в соответствии с ростом пассажира.



После того как пассажир сядет, отрегулируйте ремень безопасности и при необходимости закрепите его, как показано на рисунке.

Тормоза

Нажмите на педаль тормоза перед складыванием кресла.

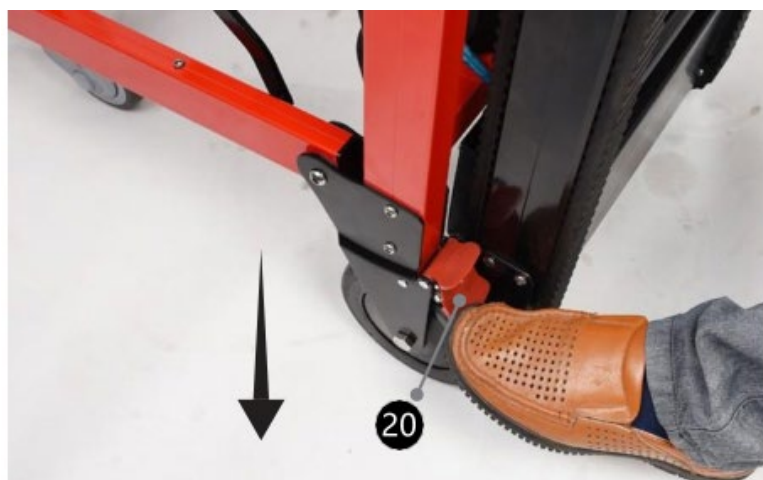

Блокировка: нажмите на педаль тормоза 20



Разблокировка: Нажмите на верх педали 22 для разблокировки.

Панель управления

Как показано, слева направо: спуск вниз "DOWN", включение питания "POWER", подсветка "LIGHTS", подъём вверх "UP".





Включение питания:

Включите аккумулятор, как показано на рисунке **f1**.

Нажмите кнопку питания, загорится индикатор, на дисплее отобразится заряд батареи.



Отключение питания:

Нажмите кнопку питания, фоновый индикатор заряда аккумулятора погаснет.

Выключите аккумулятор, как показано на рисунке **f2**

Регулировка натяжения гусеничных ремней



Натяжение гусеничных ремней можно отрегулировать, как показано на рисунке, с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

Подсветка

Нажмите кнопку LIGHT: загорится подсветка дисплея.

Повторно нажмите на кнопку LIGHT: подсветка дисплея выключится.

Подъём

Подъём: постоянно удерживайте кнопку UP.

Пауза или остановка: отпустите кнопку UP.

Спуск

Спуск: постоянно удерживайте кнопку DOWN.

Пауза или остановка: отпустите кнопку DOWN.

Использование кресла при подъеме и спуске

* Перед использованием кресла-подъемника, пожалуйста, убедитесь, что вы прошли надлежащую подготовку и знакомы с его эксплуатацией.

* Разрешено перевозить только ОДНОГО пассажира.

* Пожалуйста, потренируйтесь подниматься по лестнице без пассажира на низкой скорости.


* Перед использованием кресла, пожалуйста, проверьте оставшийся заряд аккумулятора и направляющие ремни.

Общие рекомендации по использованию кресла-подъемника


Отпустите тормоза, возьмитесь за задние рукоятки и толкните кресло вперед или назад.

Устранение неисправностей	
Неисправность	Обнаружение и устранение
Устройство не запускается или не поднимается/спускается по лестнице	Убедитесь, что выключатель питания на панели управления находится в положении "ON". Зарядите устройство. Если в аккумуляторе остался заряд, но устройство не запускается, пожалуйста, обратитесь к производителю.
Аккумулятор не заряжается	Обратитесь к производителю.


8. ПОДЪЁМ

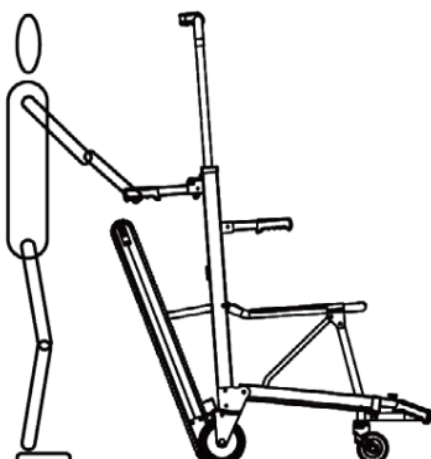


Разложите кресло, как показано на рисунке, убедитесь, что аккумулятор включен, отрегулируйте верхнюю рукоятку на подходящую высоту.

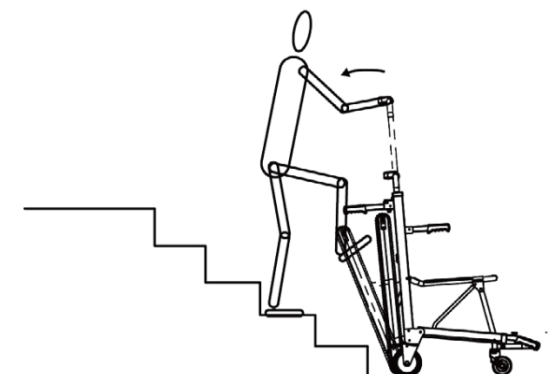


Отрегулируйте расстояние (30–40 см) между задними колесами и лестницей, медленно наклоняйте ручку назад до тех пор, пока направляющие ремни не упрутся в ступени лестницы, как показано на рисунке.

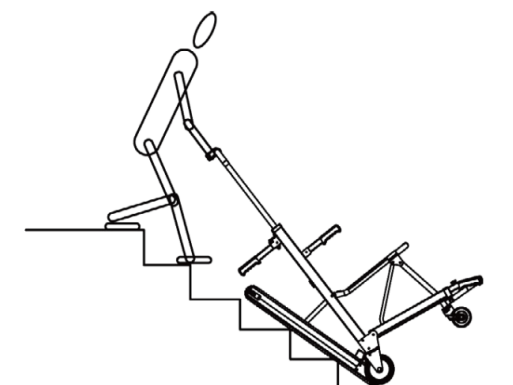


Нажмите кнопку включения POWER, чтобы начать подъем кресла, одновременно слегка надавите на раму, чтобы направляющие ремни зацепились за ступени лестницы. Удерживайте кнопку "UP" и одновременно поднимайтесь по лестнице.

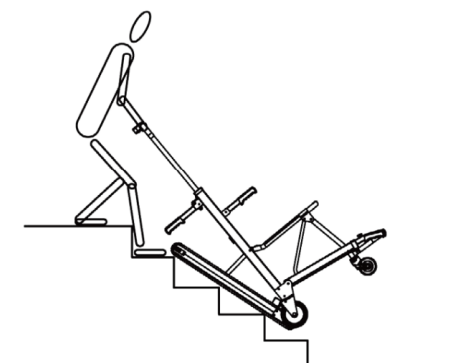


Если нужно сделать паузу или остановку, отпустите кнопку "UP".
Примечание: когда гусеничные ремни лежат на одной или двух ступеньках лестницы, обязательно прижмите раму вниз, чтобы кресло не наклонялось вперед.

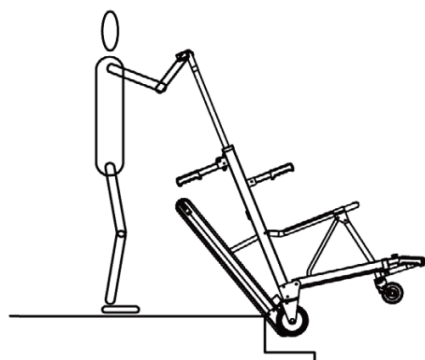


Когда все колеса окажутся на лестничной площадке, отпустите кнопку "UP", возьмитесь за ручку и медленно наклоните кресло вперед, чтобы четыре колеса встали на пол.

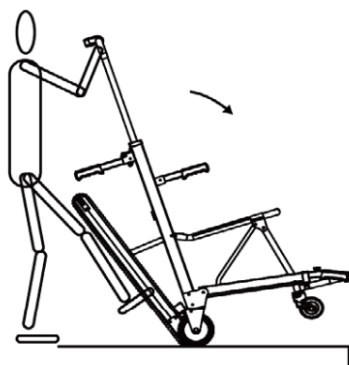

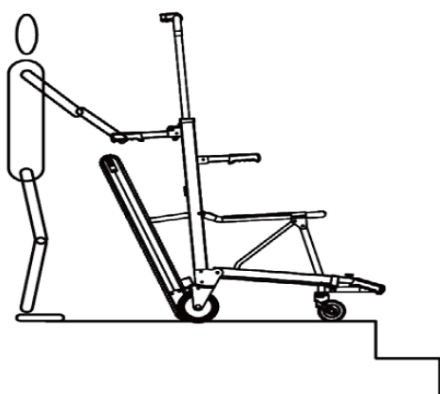


Возьмитесь за заднюю рукоятку и подтолкните кресло к следующей лестнице.


9. СПУСК

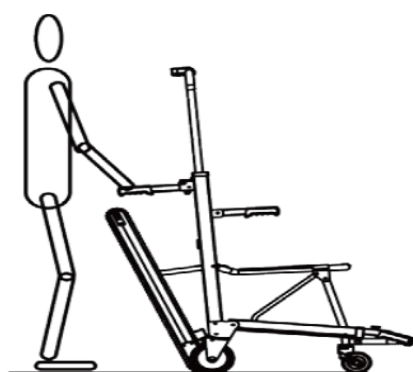


Разложите кресло, как показано на рисунке, убедитесь, что аккумулятор включен, отрегулируйте верхнюю рукоятку на подходящую высоту.

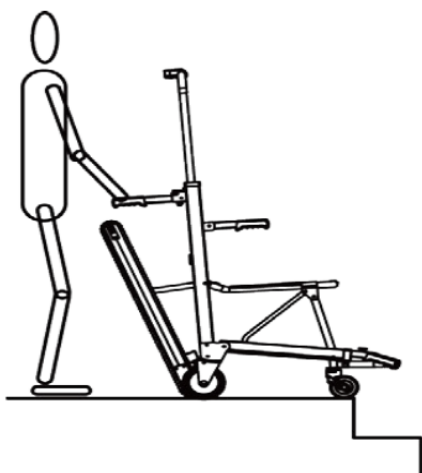


Придвиньте кресло к лестнице, отрегулируйте кресло и закрепите гусеничные ремни на середине лестницы.

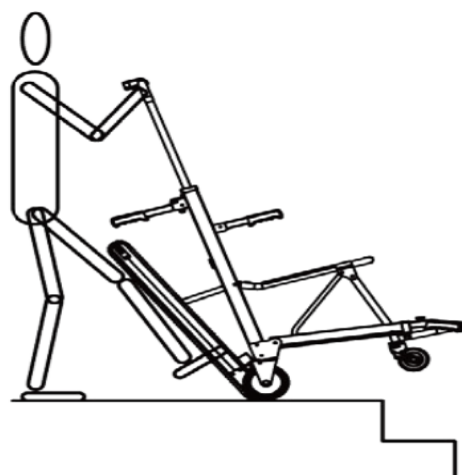


Когда передние колеса достигнут края лестницы, наклоняйте кресло назад до тех пор, пока гусеничные ремни не коснутся пола, как показано на рисунке, затем нажмите кнопку "DOWN".

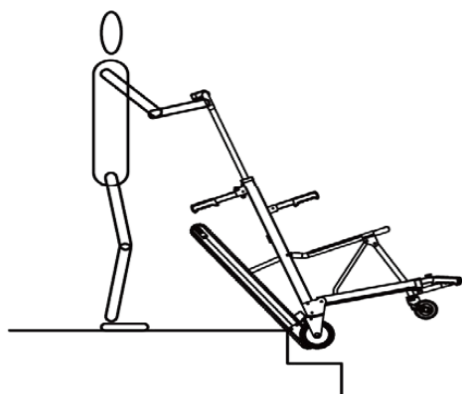


После того как ремни преодолеют первую ступень лестницы, медленно отрегулируйте кресло так, чтобы ремни прошли две/три ступени вдоль угла наклона лестницы.

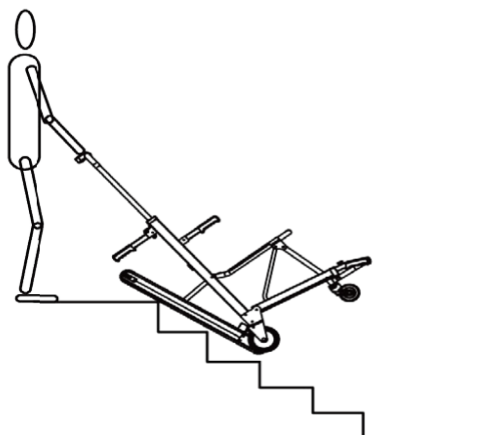

Если нужно сделать паузу или остановку, отпустите кнопку "DOWN".
Примечание: когда гусеничные ремни преодолеют одну или две ступени, слегка нажмите на рукоятку вниз, чтобы кресло не наклонилось вперед.

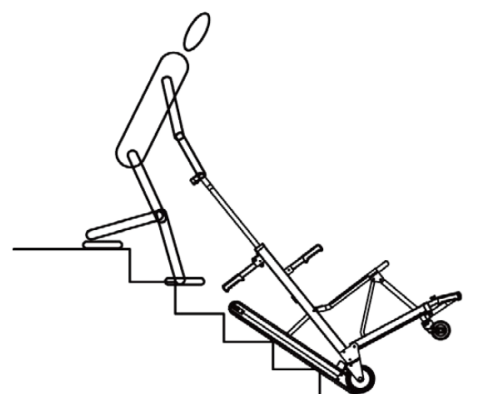

Когда направляющие ремни достигнут пола у подножия лестницы, отпустите кнопку "DOWN". Затем медленно наклоните кресло вперед, пока все четыре колеса не встанут на пол.

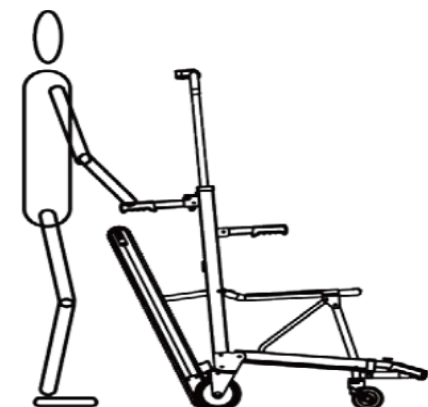

Возьмитесь за заднюю рукоятку, подтолкните кресло к следующей лестнице.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

11. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.