

ПАСПОРТ

Лупа с подсветкой настольная, арт. 5653.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Лупа в раме – 1 шт.
- 1.2. Шнур питания USB (без адаптера) – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лупа с подсветкой предназначена для использования слабовидящими людьми во время чтения различных изданий – книг, журналов, документов и пр.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Настольная лупа Френеля это оптический прибор на складных ножках. Его конструкция напоминает небольшой столик, который можно с удобством разместить над книгой, журналом или документом. Пластиковая линза лупы имеет прямоугольную форму и большие размеры: 161х238 миллиметров. Пользователь с ослабленным зрением сможет поставить лупу на страницу и прочесть большой фрагмент текста, не нуждаясь в перемещении оптического инструмента.

Линза Френеля разработана специально для чтения, однако настольный корпус позволяет с успехом применять ее для шитья, рукоделия, моделизма и других работ с мелкими деталями. Плоская линза равномерно приближает в 2,5 раза по всему полю зрения. Дюжина ярких светодиодов дает возможность использовать лупу в любых условиях, даже в полной темноте.

Лупа удобна в использовании, она не тяжелая и имеет ремешок для шеи, благодаря чему ее легко можно носить с собой, специальные раскладные ножки позволяют освободить руки при чтении.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал линзы: оптический пластик
Материал корпуса: пластик
Подсветка: 12 LED
Тип линзы: Френеля
Размер линзы: 161х238 мм
Габариты: 300х205х15 мм
Питание: 3 батарейки AAA/LR03 (не входят в комплект)
Питание от сети: 220 В (через кабель USB, адаптер в комплект не входит)
Увеличение: 2.5X
Вес: 235 г
Ножки для установки на стол: наличие
Шнур для крепления на шею: наличие.

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 5.1. Изделие поставляется в сборном виде, поэтому не требует специальной сборки.
- 5.2. Достаньте изделие из упаковки и установите его на ножки.
- 5.3. В случае использования изделия при питании от батареек, подготовьте 3 батарейки типа AAA и вставьте (в

комплект не входят) и вставьте их в специальный разъем на обратной стороне лупы. Включите подсветку лупы, используя переключатель на раме сбоку.

5.4. В случае использования изделия при питании от сети, подсоедините кабель USB (в комплекте) к лупе и источнику питания (компьютер, ноутбук). Или дополнительно используйте адаптер и подключите лупу непосредственно в розетку. Включите подсветку лупы, используя переключатель на раме сбоку.

5.5. После завершения использования изделия, отключите подсветку от питания и сложите пластиковые ножки.

5.6. Если изделие не используется долгое время, рекомендуется извлечь элементы питания.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.