

## ПАСПОРТ

### Портативная индукционная система «Альфа А3» арт. 4773.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Индукционная система – 1 шт.
- 1.2. Адаптер питания/зарядное устройство – 1 шт.
- 1.3. Набор для настенного монтажа – 1 шт.
- 1.4. Руководство пользователя – 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Портативная индукционная система Альфа А3 позволяет слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать своего собеседника на расстоянии до 2-х метров. Используется в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Индукционная система не требует специальной настройки, простая и удобная в установке. Достаточно подключить устройство к розетке, а слабослышащему посетителю переключить свой слуховой аппарат в режим «Т». Система позволяет слышать речь сотрудника, направленную в микрофон индукционной системы, без посторонних шумов.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус действия: до 2 м

Тип индукционной петли: портативная

Материал: ударопрочный АБС-пластик

Петличный микрофон: наличие

Регулирование громкости внешнего наушника: наличие

Входы: см. рисунок задней панели


Светодиодная индикация: наличие

Питание: 220 В

Размер: 280x209x19 мм

Вес: 0,6 кг.


Рис.1. Задняя панель

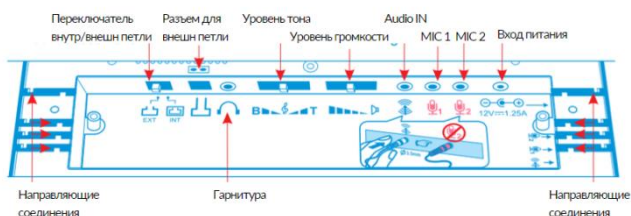

#### 5. НАСТРОЙКА

- 5.1. Открутите два винта от дверцы с выемкой (см. Рис. 2. Вид сзади).
- 5.2. Подключите кабель адаптера к розетке питания, расположенной в области гнезда управления устройства (см. Рис. 1. Задняя панель).

Рис.2. Вид сзади

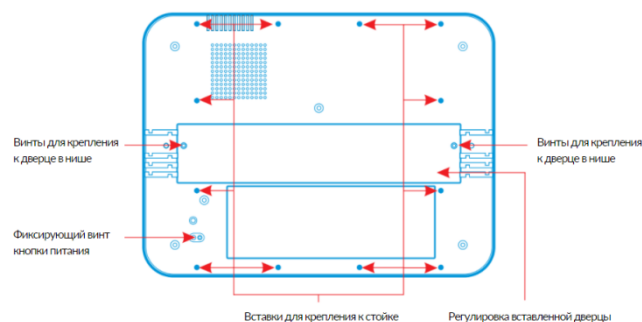

- 5.3. Подключите прилагаемый микрофон с отворотом к разъему MIC1 на задней панели устройства. Вы можете подключить другой (опционально доступный) микрофон к разъему MIC2.

- 5.4. Подключите аудиооборудование к разъему 3,5 мм (синий). Устройство может передавать звук по петле от внешнего источника звука, такого как телевизор, МРЗ, МР4 - плеер или компьютер.

- 5.5. Включите питание устройства с помощью переключателя на передней панели. Держите переключатель в положении LOW.


ПРИМЕЧАНИЕ: Положение LOW соответствует уровню громкости, установленному регулятором на шаге 6, а высокое положение соответствует громкости, когда этот переключатель установлен на максимум.

- 5.6. Установите уровень громкости с помощью 5-ти позиционного переключателя регулировки громкости.

- 5.7. Установите уровень тона с помощью 5-ти позиционного контроля управления тоном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда используется один из микрофонов, синий светодиодный индикатор под светодиодной линзой мигает с интенсивностью, зависящей от силы передаваемого магнитного сигнала через петлю.

Рис.3. Вид сбоку

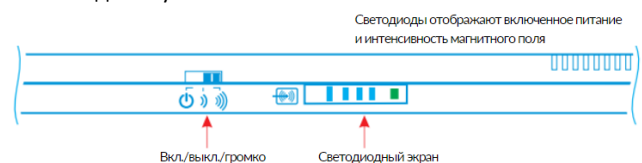


- 5.8. Как только настройка будет выполнена, установите на место дверцу контрольной ниши и 2 крепежных винта.

#### 6. РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выберите место для установки устройства. Имейте в виду допустимый диапазон покрытия (см. ниже). Для получения оптимального качества звука устройство должно находиться перед пользователем.

Рис.4. Оптимальное расположение устройства

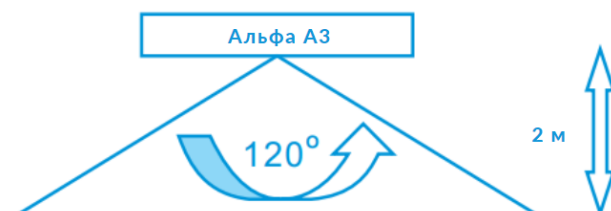

ПРИМЕЧАНИЕ: пользователи цифровых слуховых аппаратов должны убедиться, что их аппараты запрограммированы для использования с настройкой «Т».



## 7. МОНТАЖ

- 7.1. Просверлите 2 отверстия размером, подходящим для прилагаемых дюбелей на расстоянии 244 мм друг от друга на стене или панели, где предполагается установка устройства.
- 7.2. Вставьте дюбеля.
- 7.3. С помощью 2-х винтов, прилагаемых к дюбелям, надежно закрепите устройство на стене или панели.
- 7.4. Вставьте винтовые колпачки, предназначенные для закрывания головок винтов.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи оборудования.

## 9. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.