

## ПАСПОРТ

### Душевая система для МГН с настенным хирургическим смесителем, арт. 9240



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой
- Поручень прямой настенный для ванной из нержавеющей стали 700мм Ø 32 мм
- Держатель для лейки с возможностью фиксации на поручнях диаметром 32 мм
- Душевая лейка с фиксатором и шланг

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Душевая система разработана специально для оснащения санузлов и душевых комнат, предназначенных для использования маломобильными группами населения (МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Оборудование обеспечивает безопасность и комфорт при приеме душа для людей с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабым хватом, тремором рук и другими ограничениями моторики. Система может использоваться в медицинских и реабилитационных центрах, стационарах, учреждениях социального обслуживания, а также в адаптированном жилье.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия системы основан на интеграции функций опоры и управления водными процедурами в едином безопасном узле.

Ключевой особенностью является использование прочного пристенного поручня из нержавеющей стали вместо стандартной штанги для душа. Это критически важно, так как поручень рассчитан на высокие нагрузки (до 120 кг и более) и обеспечивает надежную опору при перемещении, стоянии и для предотвращения падений. Человек может безопасно опираться на него, не рискуя сорвать конструкцию.

На этот поручень устанавливается специальный держатель, который позволяет:

- Надежно зафиксировать душевую лейку на поручне.
- Свободно перемещать лейку вверх-вниз по поручню, регулируя высоту под индивидуальные потребности пользователя.

Сама душевая лейка оснащена силиконовым ремешком, который фиксирует ее на руке пользователя. Это решает проблему слабого хвата: лейка не выскользнет из руки, даже если человек расслабит кисть. Управление подачей воды осуществляется с помощью хирургического смесителя с удлиненной рукояткой (18 см), которая требует меньших усилий для поворота и удобна для людей с ограниченной подвижностью суставов. Гибкий шланг из нержавеющей стали (1,5 м) обеспечивает достаточную свободу перемещения лейки.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики смесителя:

- Рабочая температура - 80 град. С
- Максимальное давление - 1Мпа
- Длина излива 20 см/ 30 см /40 см
- Длина хирургической ручки 18 см

Характеристики поручня:

- ГОСТ Р 51261-2022 соответствует
- Назначение для ванной и душа
- Тип конструкции стационарный
- Форма Прямой
- Тип крепления пристенный
- Длина горизонтальной части (мм.) 700
- Материал поручней нержавеющая сталь
- Количество точек опоры 2
- Толщина стали 1,5 мм
- Цвет хром

#### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж системы должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии с прилагаемыми инструкциями и строительными нормами. Порядок установки:

1. Выполнить монтаж опорного поручня на стену с использованием усиленного крепежа, способного выдержать динамические нагрузки. Поручень устанавливается горизонтально на удобной для пользователя высоте.
2. Произвести монтаж настенного смесителя и подключение к водопроводу.
3. Установить на поручень передвижной держатель для лейки.
4. Подключить душевой шланг к смесителю и к лейке. Закрепить лейку в держателе.

Использование:

Пользователь, при необходимости опираясь на поручень, регулирует температуру и напор воды с помощью хирургического смесителя. Затем берет лейку, продевает кисть руки в силиконовый ремешок, фиксируя ее. Приняв душ, лейку можно поместить в держатель на поручне или временно зафиксировать на нужной высоте, переместив держатель. Важно периодически проверять надежность крепления поручня и держателя. Уход за оборудованием осуществляется с использованием мягких моющих средств.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4