

ПАСПОРТ

Опора под спину Dstrana HR 3000, арт. OP8382



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Опора под спину в сборе – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Опора предназначена для организации комфортного положения «сидя» или «полулежа» для лежачих больных, инвалидов и других маломобильных пациентов. Используется в домашних условиях, больницах, хосписах, реабилитационных центрах и учреждениях сестринского ухода. Основные задачи: обеспечение поддержки головы, плеч и спины для приема пищи, лекарств, проведения гигиенических процедур, общения; профилактика пролежней и деформации мышц за счет снижения статической нагрузки и правильного позиционирования тела; облегчение работы ухаживающего персонала.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Опора представляет собой портативное и регулируемое приспособление с устойчивым стальным каркасом. Основная рабочая часть — спинка с мягким подголовником и высокопрочной тканью, которая регулируется по углу наклона в диапазоне от 40 до 80 градусов. Принцип работы: опора размещается на кровати или другой горизонтальной поверхности за спиной пользователя. Путем плавной регулировки наклона спинки пациенту придается удобное сидячее или полусидячее положение. В сложенном виде опора компактна для хранения.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал рамы - сталь с полимерно-порошковым покрытием
- Длина изголовья - 68 см
- Угол наклона 40°-80°
- Тип: Опора под спину
- Общая длина, см: 53-68
- Грузоподъемность, кг: 100
- Общая высота, см: 44-68
- Материал рамы: Сталь
- Общая ширина, см: 64
- Вес, кг (± 5%): 3,1
- Модель: HR 3000

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Опора не требует монтажа или крепления. Она просто размещается на кровати, диване или кушетке позади пациента. Важно убедиться, что опора стоит на устойчивой, ровной поверхности, а ее ножки (основание) полностью контактируют с плоскостью.

Пациента аккуратно приподнимают и подкладывают опору под спину. Затем с помощью механизма регулировки (обычно расположенного по бокам) устанавливают комфортный угол наклона. Регулярное изменение положения пациента с

помощью опоры является важным элементом профилактики осложнений, связанных с длительным лежанием.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4