



ПАСПОРТ

Унитаз для инвалидов подвесной соответствующий нормам DSTRANA AID, арт. 4623-A

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Унитаз – 1 шт.
- 1.2. Сиденье без крышки- 1 шт.
- 1.3. Набор крепежных элементов – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной унитаз для инвалидов. Модель разработана специально для применения в санузлах общественных пространств адаптированных для людей с инвалидностью. Соответствует требованиям СП 59.13330.2020.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Главными особенностями данной модели являются увеличенная длина в 70 см (обычные унитазы длиной 48-53см) и наличие специального сиденья с фиксатором. Фиксатор удерживает сиденье на чаше унитаза и не позволяет съезжать влево-право ни при каких обстоятельствах. Важно помнить, что санузел для инвалидов адаптируется прежде всего под задачи людей на креслах-колясках, а они пересаживаются на сиденье унитаза часто резким движением-рывком. Важно, чтобы в этот момент сиденье было надежно закреплено и дополнительно усилено.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер (ВхШхГ): 700х350х385 мм
Материал: пластик, санфарфор
Покрытие: эмаль
Размер чаши: 430х350 мм
Сиденье: наличие
Смыв: каскадный
Соответствие ГОСТ и СП: наличие
Тип унитаза: подвесной
Фиксатор на сиденье без крышки к ободку унитаза: наличие
Фиксатор сиденья к ободку унитаза: наличие
Чаша: безободковая, воронкообразная
Цвет: Белый

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

5.1 Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и известкового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий санитарной керамики.

Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.

5.2 Глазурованную поверхность легко поддерживать в чистоте, так как она является стойкой к растворителям и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих средствах бытового назначения. Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот, поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.

5.3 Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков использовать специально предназначенные для этих целей чистящие средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы санитарных керамических изделий 10 лет с момента начала эксплуатации. По истечении срока службы санитарных керамических изделий изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной из-за естественного старения материала.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

см. страница 2

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 4960-029-54672351-2010 «Изделия санитарные керамические. Технические условия» при соблюдении правил их транспортировки и хранения.
- 7.2. По вопросам ремонта изделия и/или покупки запасных частей обращайтесь по месту приобретения продукции.
- 7.3. Производитель устанавливает на продукцию срок гарантии 5 лет с даты изготовления.
- 7.4. Допуски размеров соответствуют обычным для керамических изделий допускам (нормативам). При установке изделий следует учитывать возникающие при производстве отклонения от размеров, указанных в инструкциях.
- 7.5. Производитель оставляет за собой право на частичные и конструктивные изменения.

8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@d-strana.ru
Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23
Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201 ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2

ИНСТРУКЦИЯ


по нормативному размещению подвесного унитаза и поручней в комплекте с инсталляцией и закладными

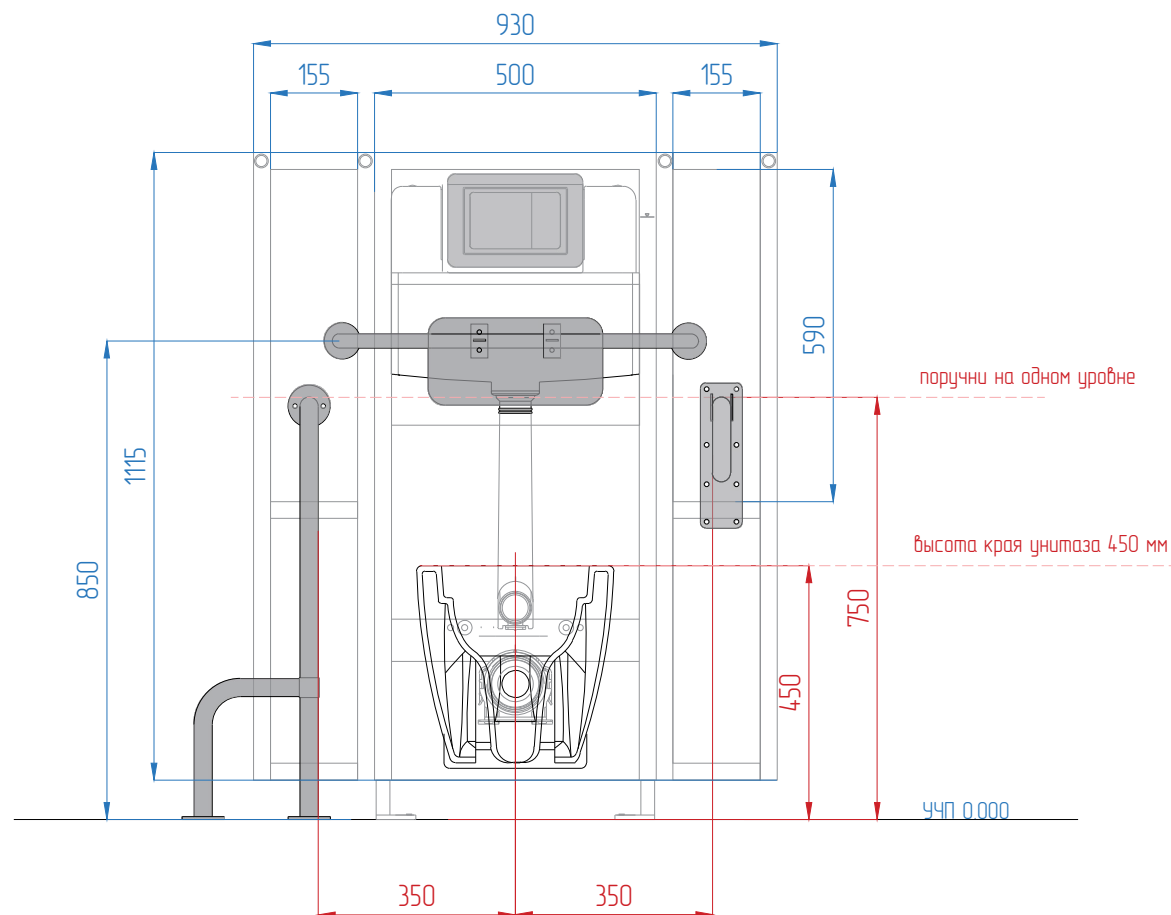

*Требования к унитазу и высоте установки (от уровня чистого пола)
согласно СП 59.13330.2020

На откидном поручне СПЕЦИАЛЬНО для установки на закладные изготовлено 8 отверстий.
Основная фиксация приходится на 6 отверстий

Фрагмент монтажа откидного поручня

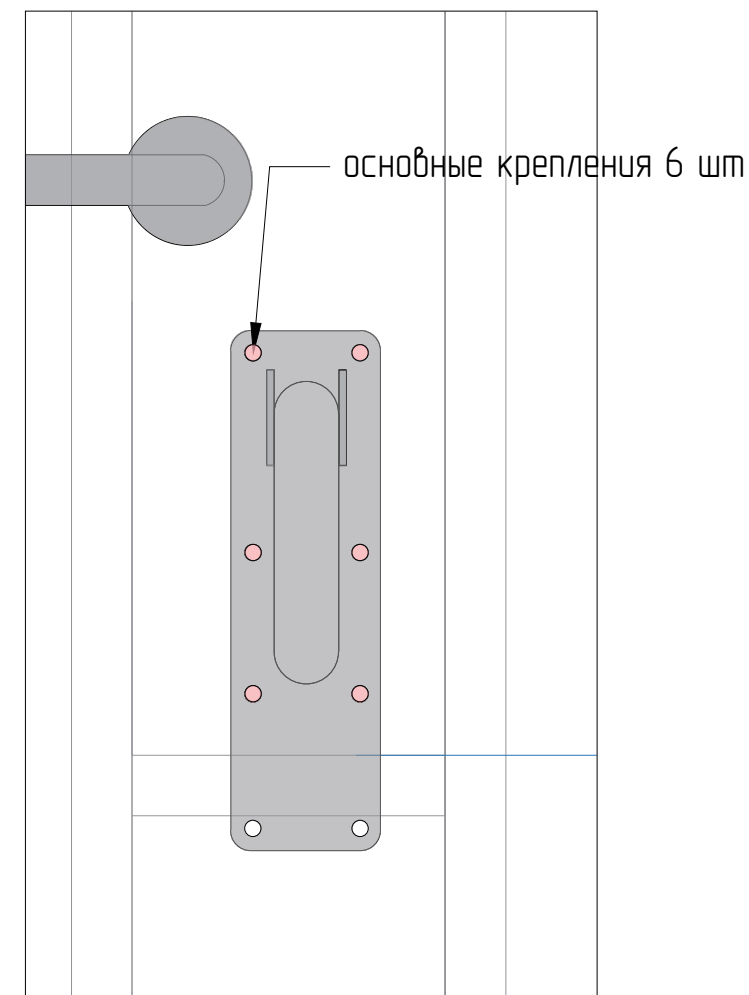

ДОСТУПНАЯ
СТРАНА



Решения для адаптации и реабилитации