

ПАСПОРТ

Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали, арт. 2269.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Крючок – 1 шт.
- 1.2. Табличка – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Крючок для костылей используется для удобного расположения трости или костылей на стене. Является травмобезопасным и подходит для установки в санузлах для инвалидов. Крючок не предназначен для использования в качестве держателя сумок и одежды. Соответствует программе "Доступная среда".

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Универсальный травмобезопасный держатель для крепления одновременно до двух костылей или тростей. Преимущество такого крючка в возможности выдержать до 16 кг веса. Изделие представляет собой крючок-держатель, изготовленный из нержавеющей стали. В комплект изделия входит прямоугольная тактильная табличка, изготовленная из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде костылей для обозначения назначения изделия.

Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН. Монтаж изделия осуществляется на дюбель-гвозди.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крючок

Размер: 40x95x105 мм

Максимальная нагрузка: 16 кг

Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304

Табличка

Размер: 150x200x90 мм

Толщина: 3 мм

Материал: ударопрочный пластик полистирол

Цвет: желтый, черный

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение крючка для инвалида. Рекомендованная высота установки 0,9 – 1 м от уровня пола. Также сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.

5.3. Крючок с табличкой закрепляется на ровной поверхности крепежами, добиваясь устойчивого положения.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14,

кв. 194 Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд

Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4