

ПАСПОРТ

Поручень откидной настенный из нержавеющей стали марки AISI 304

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла (душевой комнаты), конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной - не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Выполнен из цельной трубы, не имеет видимых швов и соединений, в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».

*Поручни с ПВХ накладками (см. таблицу 1):

Теплые поручни представляют собой металлическую конструкцию, покрытой съемной или несъемной накладкой из ПВХ. Они обладают низкой теплопроводностью, что позволяет поддерживать комфортную температуру материала при любых погодных условиях. ПВХ не замерзает на морозе и не перегревается на жаре. Накладка по цвету отличается от металлического основания, поэтому поручни хорошо заметны посетителям с плохим зрением. Синтетическая накладка не дает рукам скользить по металлу, поэтому конструкция может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Такие поручни снижают риск падения на улице во время осадков и в ванных комнатах.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: согласно таблице 1

Бумагодержатель: наличие согласно таблице 1

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304

Цвет: согласно таблице 1

Толщина стали: не менее 1,5 мм.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.

5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами, добиваясь устойчивого положения.

ВАЖНО! Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства. Это требование не распространяется на теплые поручни.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2

Таблица 1

Артикул	Наименование	Размер в мм.	Конструкция	Крепление	Бумагодержатель	ПВХ накладки	Цвет
Т-К3204-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	да	–	белый
3204-800 (покраска)	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	да	–	белый
3207-900-8	Поручень для инвалидов откидной настенный	900x150, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
Т-К3204-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	да	–	белый
6975-700	Поручень для инвалидов откидной настенный	700, d=32	откидной	настенный	–	–	черн
6975	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	–	–	черн
8900	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x230, d=32	откидной	настенный	–	–	белый
3207-600/38	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x200, d=38	откидной	настенный	–	–	хром
3207-600/40	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x200, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
3207-600	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x230, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
К3207-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
3207-800/38	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=38	откидной	настенный	–	–	хром
3207-800/40	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=40	откидной	настенный	–	–	хром
3207-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x230, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
3207-150	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x150, d=32	откидной	настенный	–	–	белый
3207-900	Поручень для инвалидов откидной настенный	900x150, d=32	откидной	настенный	–	–	белый
3207-950	Поручень для инвалидов откидной настенный	950x150, d=32	откидной	настенный	–	–	хром
3204-600/38	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x200, d=38	откидной	настенный	да	–	хром
3204-600/40	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x200, d=40	откидной	настенный	да	–	хром
3204-600	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x230, d=32	откидной	настенный	да	–	хром
К3204-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	да	–	хром
3204-800/38	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=38	откидной	настенный	да	–	хром
3204-800/40	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x200, d=40	откидной	настенный	да	–	хром
3204-800	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x220, d=32	откидной	настенный	да	–	хром
3207-800-пвх	Поручень для инвалидов с ПВХ накладками откидной настенный	800x200, d=32	откидной	настенный	–	да	хром
8896	Поручень для инвалидов откидной настенный	850x150, d=32	откидной	настенный	–	–	белый
8903	Поручень для инвалидов откидной настенный	700x150, d=32	откидной	настенный	–	–	белый
9334	Поручень для инвалидов откидной настенный	600x200, d=30	откидной	настенный	–	–	белый
9336	Поручень для инвалидов откидной настенный	800x230, d=32	откидной	настенный	–	–	белый