

# ПАСПОРТ

# Поручень откидной настенный с опорой в пол из нержавеющей стали марки AISI 304

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

# 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень - 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла (душевой комнаты), конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной - не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Выполнен из цельной трубы, не имеет видимых швов и соединений, в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».

\*Поручни с ПВХ накладками (см. таблицу 1):

Теплые поручни представляют собой металлическую конструкцию, покрытой съемной или несъемной накладкой из ПВХ. Они обладают низкой теплопроводностью, что позволяет поддерживать комфортную температуру материала при любых погодных условиях. ПВХ не замерзает на морозе и не перегревается на жаре. Накладка по цвету отличается от металлического основания, поэтому поручни хорошо заметны посетителям с плохим зрением. Синтетическая накладка не дает рукам скользить по металлу, поэтому конструкция может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Такие поручни снижают риск падения на улице во время осадков и в ванных комнатах.

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: согласно таблице 1

Бумагодержатель: наличие согласно таблице 1

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304

Цвет: согласно таблице 1 Толщина стали: не менее 1,5 мм.

# 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.
- 5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.
- 5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами, добиваясь устойчивого положения.

**ВАЖНО!** Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства. Это требование не распространяется на теплые поручни.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» Сайт: https://dostupnaya-strana.ru

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3, этаж 2

Таблица 1

						ПВХ	
Артикул	Наименование	Размер в мм.	Конструкция	Крепление	Бумагодержатель	накладки	Цвет
7301-625	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	625x750, d=32	откидной	настенно- напольный	-	-	хром
7301-625/38	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	625x750, d=38	откидной	настенно- напольный	1	-	хром
7301-625/40	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	625x750, d=40	откидной	настенно- напольный	1	ı	хром
7301-800	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	800x750, d=32	откидной	настенно- напольный	-	ı	хром
7301-800/38	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	800x750, d=38	откидной	настенно- напольный	-	-	хром
7301-800/40	Поручень для инвалидов откидной настенной с опорой в пол	800x750, d=40	откидной	настенно- напольный	-	-	хром