

ПАСПОРТ

Беспроводная влагозащищенная дополнительная кнопка вызова медсестры с табличкой для инвалидов **ibells APE510**.



*На картинке представлена комплектация APE510

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Кнопка вызова – 1 шт.
- 1.2. Тактильная табличка - согласно таблице 1.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная антивандальная влагозащищенная кнопка вызова подходит к комплектам: A310, A311, A312, APE510.1, APE510.2. Позволяет осуществлять оперативные вызовы медперсонала. Используется в сочетании с устройствами, способными принять этот вызов: коридорное табло, пейджер и другими кнопками данной серии APE.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Всепогодная антивандальная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом.

При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен и сотрудник получил сообщение.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15x20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. По истечении срока службы батарейки, для замены достаточно снять основание кнопки.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка

Размер: 82x65x28 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет: белый корпус, красная кнопка,
надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки

Питание: батарея 12V, 23А

Частота: 433.92 МГц

Ресурс: 1 млн нажатий

Радиус действия: 100 м на прямой видимости

Температурный режим работы: -35..+55° С

Срок службы батареи: 12-18 месяцев.



Табличка

Размер: 15x20 см, толщина 2 мм

Размер пиктограммы: 15x15 см

Тактильная зона шрифтом Брайля: 50 мм

Высота тактильных точек: 0,7 мм

Материал: ударопрочный пластик полистирол

Цвет: желтый, черный



5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

5.2. Для того чтобы привязать кнопку к приемнику требуется зажать кнопку на приемнике (третью снизу) до момента, пока не загорится индикатор. После того, как индикатор загорелся, требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью снизу) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника. ПРИМЕЧАНИЕ: Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4