

ПАСПОРТ

Стол для инвалидов колясочников СИ 1, арт. 2111

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.



1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Стол для инвалидов колясочников СИ 1.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение комфортного размещения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата (колясочников) в образовательных учреждениях, библиотеках, пансионатах, санаториях, интернатах и иных организациях, участвующих в программе "Доступная среда". Столик оснащен регулируемой высотой, широким радиусным вырезом крышки и свободным пространством для ног, обеспечивая удобство пользования объектами, расположенными на столе.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Модель регулируется по высоте, выдерживает высокую вертикальную нагрузку, располагает свободным пространством перед ногами сидящего. Для удобства людей с нарушением ОДА крышка стола имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Это даёт возможность сидящему за столом СИ-1 ученику самостоятельно доставать объекты, размещённые на противоположном конце стола. Предусмотрена плавная настройка высоты, в границах 600-950 мм. Стол для инвалидов-колясочников позволяет с комфортом размещаться взрослым и детям на коляске или стуле. Место для ног просторное, свободное, не сковывает движения. Такая мебель устанавливается в рамках реализации программы "Доступная среда" в учебных заведениях, библиотеках, пансионатах, санаториях, интернатах и других организациях, где ведётся прием, обучение и предоставление рабочего места инвалидам.


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол для инвалидов с железным каркасом, сделан из квадратной и прямоугольной трубы. Защитно—декоративное покрытие каркаса — полимер светло—серого цвета.

Регулировка высоты: 600-950 мм.

Ширина: 900 мм.

Длина: 1000 мм.

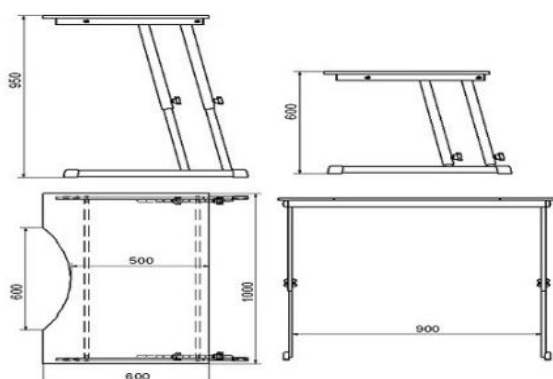

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к установке:

1. Убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная.
2. Проверьте комплектность изделия согласно инструкции.
3. Регулировка высоты: Используйте встроенный механизм регулировки, плавно поднимайте или опускайте столик до необходимого уровня, учитывая индивидуальные потребности пользователя.
4. Установка в помещении: Расположите стол таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ и безопасность передвижения пользователей на креслах-каталках.

Использование мебелью лицами с ограниченными возможностями:

1. Пользователь должен удобно располагаться за столом, свободно помещаясь на своей коляске или специализированном стуле.
2. Крышка стола должна находиться на комфортной высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ к материалам и предметам, расположенным на поверхности.

Требования к обслуживанию мебели:

1. Периодически проверяйте надежность крепления элементов конструкции.
2. Следите за чистотой покрытия и своевременно удаляйте загрязнения мягкими моющими средствами.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2