

ПАСПОРТ

Эвакуационный лестничный стул (кресло) арт. 2553.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ



2. НАЗНАЧЕНИЕ

Эвакуационное кресло - подъёмник – это универсальное решение для экстренной эвакуации, широко признанное в качестве устройства для спуска и подъёма по лестнице. В экстренных случаях, когда лифты перестают работать, люди с ограниченными возможностями перемещаются на первый этаж с помощью эвакуационного кресла. Эвакуационное кресло также может использоваться для людей с ограниченной подвижностью, слепых, страдающих астмой, травмированных, пожилых людей, младенцев, беременных, лиц, страдающих эпилепсией и лиц со стенокардией.

Эвакуационное кресло - подъёмник может использоваться во время отключения электроэнергии, террористических атак, ложных тревог, стихийных бедствий: таких как пожар, наводнение, землетрясения и т. д.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер в разложенном виде: 1080*530*800 см
Размер в сложенном виде: 1080*530*330 см
Размер сидения: 49*42.5 см; Высота=50 см
Верхняя рама: В = 108,127,146,164 см
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
Вес: 15 Kг
Нагрузка: МАКС. 180 Kг


4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Разложите кресло, как показано на рисунке, возьмитесь одной рукой за сиденье, а другой - за телескопическую раму - держатель.




4.2 При необходимости разложите задние ручки, как показано на рисунке, до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

4.3 Сложите задние ручки: Нажмите на фиксаторы и сложите ручки вниз.

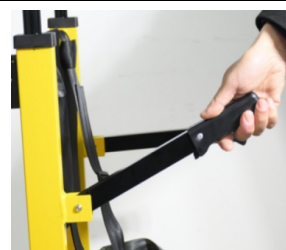

4.4 Разложите подлокотники, как показано на рисунке. Потяните подлокотники вверх, как показано на рисунке.

4.5 Разблокируйте гусеничный ремень: Нажмите на красную фиксирующую педаль

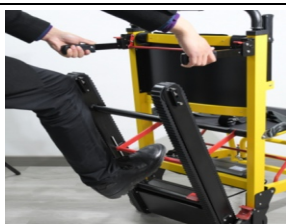

4.6 Установка направляющих ремней: Нажмите на красный рычаг.

4.7 Спускаясь вниз, оператор должен отрегулировать высоту рамы телескопического захвата так, чтобы она соответствовала высоте плеч оператора.



4.8 Разложите педаль, как показано на рисунке. Поверните педаль вверх, как показано на рисунке.

4.9 После того, как пассажир сядет, отрегулируйте ремень безопасности и при необходимости закрепите его, как показано на рисунке.





4.10 Выдвиньте телескопические передние ручки: нажмите красную кнопку и тяните за ручки до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Складывание: нажмите красную кнопку и задвиньте ручки.

4.11 Возьмитесь за сиденье одной рукой, а другой - за раму, нажмите на откидную опорную скобу, затем, когда скоба выйдет из фиксирующего положения, сложите сиденье.




4.12 Блокировка тормозов: Нажмите на педаль тормоза.

Разблокировка: для разблокировки нажмите на верхнюю часть педали тормоза.

4.13 Регулировка натяжения привода: для ослабления или усиления натяжения отрегулируйте ремень с помощью шестигранного ключа, как показано на рисунке.



6. ПОДЪЁМ

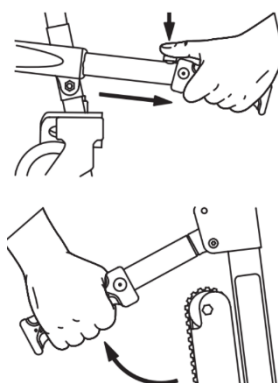

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

E-mail: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.

5. СПУСК

