

ПАСПОРТ

Поручень для раковины на стойках 600х730х800 мм (подходит для раковин У1 арт.2620 и У3 арт.10754), арт. 3213-5.



7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень – 1 шт.;

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Поручень для раковины предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Поручень на стойках для раковины с увеличенной высотой 600х730х800мм, оснащен четырьмя опорами, 2 из которых размещены на полу, а остальные прикреплены к стенке. Опора произведена из качественной нержавеющей полированной стали.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 600х730х800 мм

Назначение: поручень для санузла

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304

Цвет изделия: хром

Количество точек опоры: 4

Толщина стали: 1,5мм

Диаметр: 32мм

Конструкция: стационарный

Крепление: напольно-пристенный

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.

5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами (не входят в комплект), добиваясь устойчивого положения.

ВАЖНО! Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства. Это требование не распространяется на теплые поручни.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.